



## Monitor FallGuard CordLess Moniteur à prévention de chute Smart sans fil



### Mode d'emploi des coussinets de lit sans fil SMART GBT-W1 et GCT-W1

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de remplacer le coussinet après un an d'utilisation.

Ce coussinet est conçu pour être utilisé avec les moniteurs de gestion des chutes sans fil. Ni les coussinets ni les moniteurs sans fil ne nécessitent de câbles pour fonctionner ensemble. La technologie sans fil utilisée par le coussinet, en cours de brevet, repose sur un émetteur intégré dans son manchon pour communiquer avec le moniteur.

**Avertissement :** Le fabricant ne garantit pas que ce dispositif empêchera les chutes ou les tentatives de fugue des utilisateurs.

Veuillez noter que ce coussinet est un modèle standard et ne dispose pas d'une horloge interne. Il est compatible avec les moniteurs de la série « Change pad indicator », mais l'indicateur « Change pad » ne signalera pas la fin de la période de garantie du coussinet. Ce système est conçu pour fonctionner uniquement avec un coussinet équipé d'une horloge interne. Pour toute information complémentaire, contactez-nous au : 1-800-361-3537

### Mise en service

1. Insérez les piles dans le moniteur sans fil de gestion des chutes SMART. Avec l'émetteur à proximité, appuyez sur le bouton « Program » situé à l'arrière du moniteur. Celui-ci émettra trois « Bips » pour indiquer qu'il est en mode programmation et le voyant « In use » s'allumera.
2. Activez l'émetteur. Le moniteur émettra une tonalité prolongée indiquant que la programmation est terminée. Remplacez l'émetteur dans le manchon du coussinet.
3. Appliquez une pression sur le coussinet sans fil pour activer le moniteur. Celui-ci émettra deux « Bips » confirmant que le coussinet et le moniteur fonctionnent correctement. Le voyant « In use » clignotera tant que la pression est maintenue. Lorsque la pression est relâchée, le moniteur déclenchera une alarme. Appuyez sur le bouton « Reset » pour arrêter l'alarme.
4. Lorsque le coussinet doit être remplacé, retirez l'émetteur du manchon. Faites glisser le curseur de l'émetteur sur « Off » et conservez l'émetteur jusqu'à son utilisation avec un nouveau coussinet sans fil.
5. Pour assurer la stabilité du coussinet sur le lit, il est recommandé d'utiliser le système de fixation en option.

### ENTRETIEN

- Lors de l'utilisation du coussinet avec un surmatelas en mousse ou en gel, vérifiez toujours le bon fonctionnement du système.
- Pour limiter les risques d'infection, il est conseillé d'utiliser un coussinet neuf pour chaque patient.
- Nettoyez le coussinet à l'aide d'une lingette désinfectante ou d'un produit antibactérien.
- Ne pas plier le coussinet.
- Ne pas immerger le coussinet dans un liquide ou une solution nettoyante.
- Ne pas exposer le coussinet à des températures élevées ni l'insérer dans un stérilisateur.



# Monitor FallGuard CordLess Moniteur à prévention de chute Smart sans fil



## DÉPANNAGE

- Vérifiez le voyant « Pad signal » sur le moniteur. Le voyant « Status / In use » doit clignoter pour indiquer le bon fonctionnement du coussinet. Si le voyant « Check pad » clignote, cela peut signifier que le coussinet est hors de portée (environ 7 mètres) ou que la batterie de l'émetteur est faible.
- Assurez-vous que le curseur de l'émetteur est en position « On » et que le voyant rouge clignote toutes les 20 secondes, confirmant son bon fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous au 1-800-361-3537 .
- Vérifiez l'alimentation du moniteur. Si vous utilisez une batterie et que le voyant « Low battery » est allumé, remplacez la batterie. Si un adaptateur secteur est utilisé, assurez-vous qu'il est bien branché et que la prise murale fonctionne.
- Si le problème persiste, contactez-nous en ayant à disposition le moniteur, le coussinet et l'émetteur.

## MISE EN GARDE

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, pouvant aller jusqu'au décès de l'utilisateur. Ce dispositif ne convient pas à tous les utilisateurs et peut nécessiter l'utilisation d'autres équipements complémentaires. Il ne remplace pas une surveillance visuelle. Le fabricant ne garantit pas que ce dispositif empêchera les chutes ou les tentatives de fugue. Les coussinets et moniteurs peuvent être sujets à des pannes. Assurez-vous que l'utilisateur ne peut ni s'emmêler ni s'étrangler avec un câble. Ce dispositif est conçu pour assister les intervenants dans la gestion des chutes. Vérifiez son bon fonctionnement avant chaque utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi et les avertissements avant toute utilisation.

## AVIS LÉGAL

Les coussinets et moniteurs de SMART CAREGIVER CORPORATION sont conçus pour être installés par l'utilisateur. Il est donc de sa responsabilité de s'assurer du bon montage et des vérifications nécessaires. Ce dispositif ne remplace pas la surveillance du personnel et requiert :

- o Une supervision du patient
- o Une formation adéquate du personnel à la gestion des chutes et des fugues
- o Une vérification du dispositif avant chaque utilisation

Le vendeur limite sa responsabilité au remboursement ou au remplacement des produits. Il ne peut être tenu responsable d'éventuels dommages résultant de leur utilisation.

## GARANTIE LIMITÉE

Le vendeur garantit que le produit est exempt de défauts de fabrication pendant la durée stipulée sur le coussinet, à compter de la date d'achat. Aucune autre garantie implicite ne s'applique.

Aucune déclaration, verbale ou écrite, du vendeur ne constitue une garantie supplémentaire. L'acheteur est responsable de la performance du produit après installation. En cas de défaut, seuls les frais d'installation, d'entretien ou de réparation seront à la charge de l'acheteur, et non du fabricant, du distributeur ou du détaillant.

Fabriqué par : Smart Caregiver Corporation 1229N. Mc Dowell Blvd Petaluma, California 949